

Instrukcja obsługi

Poduszka rozgrzewająca z pestkami czereśni - SJH 580,581

Działanie:

Poduszka z pestkami czereśni przynosi ulgę w bólach kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego, szyi, ramion, brzucha, pleców, rozluźnia zeszywniałe mięśnie, stawy, łagodzi stres i napięcie. Pestki czereśni doskonale dopasowują się do ludzkiego ciała, mają doskonałą zdolność kumulowania ciepła i doskonale rozgrzewają problematyczne miejsca. Stosuj je przed masażem, rehabilitacją lub w warunkach domowych do normalnego rozluźnienia zmęczonych części ciała. Poduszkę można również przykładać do wszystkich części ciała, gdzie ciepło jest komfortowe i przynosi ulgę.

Instrukcja użytkowania:

Umieść poduszkę z pestkami czereśni w kuchence mikrofalowej. Umieść matę filiżankę zimnej wody wypełnioną do połowy obok poduszki i podgrzewaj przez 1 minutę (500 - 750 W) lub 30 sekund (750 W-1000 W).

Jeśli poduszka nie jest wystarczająco podgrzana, należy powtórzyć procedurę.

Zatrzymaj ogrzewanie w połowie i potrząśnij woreczkiem, aby lepiej rozprzewadzić ciepło. Sprawdź temperaturę ogrzania, umieszczając go na nadgarstku lub łokciu.

Jest to produkt naturalny i przy pierwszym użyciu może wydawać się wilgotny.

Nie należy wydłużać zalecanego czasu ogrzewania. Przed użyciem należy sprawdzić stopień ogrzania. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ognia.

Produkt może być również używany jako zimny kompres - umieść go w plastikowej torbie lub worku i pozostaw do ostygnięcia.

Produkt zawiera pestki czereśni i może powodować problemy u osób uczulonych na pestki. W przypadku ciąży należy skonsultować się z lekarzem.

Podczas podgrzewania produkt powinien być nadzorowany przez osobę dorosłą.

Ostrzeżenie: zachować ostrożność podczas wyjmowania z kuchenki mikrofalowej. Nie przegrzewać. Nie używać po przegrzaniu. Nie wyrzucać po podgrzaniu. Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Można prać w temperaturze 30°C.

Wypełnienie: 100% pestki czereśni

Pokrowiec: 100% bawełna